

Gebruiksaanwijzing



Tips voor optimaal gebruik van deze bloedafnameset

- Lees voor u begint zorgvuldig deze handleiding
- De videohandleiding vindt u op www.soatestanywhere.nl
- Verstuur het bloed op de dag van bloedafname.
- U kunt het elke dag versturen, bij voorkeur op zondag t/m donderdag, tenzij er meer dan 2 dagen geen reguliere werkdag is (bv kerst, pasen, etc.).
- Uw bloed moet binnen 4 dagen na prikken in het laboratorium zijn, om betrouwbare metingen te kunnen verrichten.

Heeft u vragen of suggesties?
 Neem dan contact met ons op!
 ☎ +31 (23) - 5300 538 (tijdens kantooruren)
 ✉ support@soatestanywhere.nl

SOATestAnywhere B.V.
 Haarlem

Inhoud van de verpakking

In de verpakking bevinden zich minimaal de volgende onderdelen:



1. Ontsmettingsdoekje



2. 2 vingerprikkers



3. Zuiger met sponsje



4. Buisje met vloeistof



5. Filter



6. Afsluitdop



7. Pleister



8. Absorptie zakje



9. Lekkrije sealbag

10. Aanvraagformulier
 (Indien u meer dan één buisje moet afnemen bevinden zich in deze verpakking van de nummers 3-7 dubbele aantallen.)

Meer dan 1 buisje nodig? Herhaal dan vanaf stap 2.
 Wanneer er nog genoeg bloed uit de eerste prikplaats komt kan de afname herhaald worden vanaf stap 5.

Stap 1



Was uw handen met warm water en zeep.

Leg alles klaar op een schone ondergrond.

Maak het zilverkleurige zakje open en haal het buisje met vloeistof (4) eruit.
 Zet het buisje in de ronde opening van de plastic verpakking.

Stap 2



Draai het witte dopje van één van de vingerprikkers (2) (niet trekken of breken).

De tweede vingerprikker is een reserve prikker.

Stap 3




Als u koude handen heeft, maak deze dan eerst warm in warm water.

Ontsmet uw middelvinger met het doekje (1). Wacht tot de vinger **droog** is voor het prikken.

Masseer het bloed enkele tellen omhoog naar de top van uw middelvinger.

Stap 4

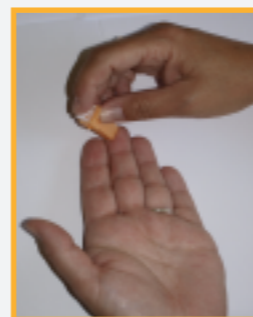


Leg uw hand met **de rug** naar beneden op tafel.

Plaats de vingerprikker (2) aan de **zijkant van het topje** van uw middelvinger en druk deze aan.

Druk daarna op de witte knop aan de bovenzijde. Het naaldje prikt dan in de vinger.


Stap 5

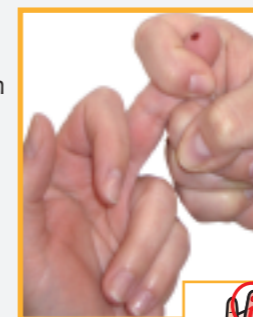

Volgt er niet meteen een druppel bloed, stuw dan met uw andere hand zoveel mogelijk bloed naar uw vingertop.



Stap 6

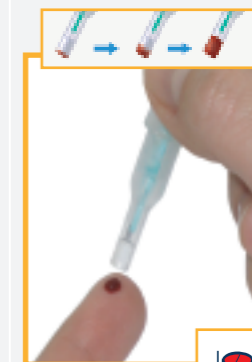

Neem zuiger met sponsje (3) **tussen duim en wijsvinger** en zuig daarmee de bloeddruppels op.

Herhaal stap 5 en 6 totdat het sponsje geen bloed meer opneemt. U kunt tijdens het stuwen de zuiger neerleggen.



De kleine lettertjes

Dit product mag door iedereen gebruikt worden, behalve door personen: - met een lage bloedstolling - die in shocktoestand verkeren

Algemeen

- Het is belangrijk om uw handen goed te wassen en uw vingertop te desinfecteren met het ontsmettingsdoekje
- Gebruik altijd een schone tafel om uw hand op te leggen bij het afnemen van het bloed
- Dit product mag niet door meerdere personen worden gebruikt
- Dit product is geschikt voor eenmalig gebruik
- Dit product alleen gebruiken voor het prikken van bloed
- Met de vingerprikker alleen in de vingertop prikken
- De onderdelen die zich in de verpakking bevinden niet uit elkaar halen
- Houd dit product buiten bereik van kinderen
- Vermijd contact met ogen en mond


- Bewaar het product op een donkere plaats en bij kamertemperatuur.
- Gebruik het product niet als de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is. Deze staat op de verpakking.
- Na het prikken het pakket niet op een warme plaats bewaren. Als het warmer is dan 25 graden Celcius, bewaar het pakket dan tot verzending in de koelkast.

- Niets uit de verpakking is bestemd voor inwendig gebruik.
- Het resultaat van dit onderzoek is voor uw eigen gebruik en uw eigen verantwoording. Indien u aan uw eigen gezondheid of lichamelijke conditie twijfelt, ga dan naar uw huisarts.
- Dit product kan onderhevig zijn aan productontwikkeling.

De algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website; www.soatestanywhere.nl

versie september 2010

Stap 7

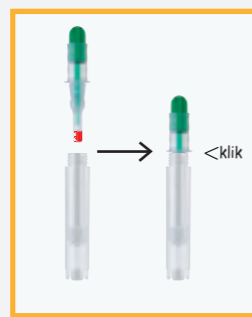

Draai het witte dopje van het buisje met vloeistof (4). Pak de zuiger aan de **zijkant** vast.
 Zet de zuiger met het bloed gevulde sponsje in het buisje met vloeistof (4). Druk aan totdat u een **klik** hoort.

U heeft nu even de tijd om de pleister aan te brengen.

Stap 8



Druk op het groene knopje van de zuiger, zodat het sponsje met bloed in het buisje valt.

Haal nu de zuiger uit het buisje.

Sluit het buisje af met het witte dopje.

Stap 9



Schud het buisje ca. 40 seconden goed, totdat het sponsje niet meer te zien is in de rode vloeistof.

LET OP: 40 SECONDEN GOED SCHUDDEN!

Stap 10



Open het buisje weer. Pak het filter (5) en steek deze, met het zwarte gedeelte naar beneden, in het buisje met vloeistof. Druk het filter **helemaal** naar beneden.

U ziet het heldere bloedplasma boven het zwarte gedeelte verschijnen.

Stap 11



Laat het filter in het buisje zitten!

Plaats de groene afsluitdop (6) in het buisje met het zwarte puntje naar beneden. Draai deze nu stevig vast om het buisje luchtdicht af te sluiten.

Stap 12



Neem **één** barcode sticker van het aanvraagformulier en plak deze op het buisje zoals op de afbeelding.

Plaats het buisje in het absorptiezakje (8). Doe dit zakje in de sealbag (9). Verwijder de zilverkleurige foliestrip om het zakje dicht te plakken.

Stap 13



Doe de sealbag samen met het **ingevulde** aanvraagformulier in de witte doos. De witte doos is gefrankeerd.

Plak de doos dicht en breng het direct naar de brievenbus, bij voorkeur vlak voor de eerstvolgende lichter.

De materialen die overblijven, kunt u bij het gewone huisafval deponeren.

Bloedafnameset (Demecal Set)



Hulpmiddel voor In Vitro Diagnostiek



Op dit product berust CE-marking



Fabrikant: LabAnywhere B.V.



Te gebruiken vóór: datum zie onderzijde verpakking

Voor de vingerprikkers geldt:

Fabrikant: BD, Franklin Lakes, NJ, USA
 EC REP: BD, Belliver Industrial Estate, Plymouth, PL6 7BP.



CE Markering: no. 252.189, art.nr. 366587.