



Lees voordat u begint zorgvuldig deze handleiding.
Verstuur de urine op de dag van afname.

Vragen of opmerkingen over dit product?
Bel of mail **i-thatsme**.

Gebruiksaanwijzing urine afname voor de man

De Urine afnameset bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een spuit
2. Een dop voor op de spuit
3. Een buisje (rietje) voor op de spuit

Heeft u vragen of suggesties?

Neem dan contact met ons op!
+31 (23) - 5300 538 (tijdens kantooruren)
support@i-thatsme.nl

SOATestAnywhere B.V.
Haarlem

i-thatsme.nl

LET OP:

Voor het vaststellen van eventuele microbiologische afwijkingen die in urine geconstateerd kunnen worden, is de eerste straal urine die wordt uitgeplast nodig. Dit mag ochtend urine zijn maar is niet noodzakelijk.

Voor het verzamelen van uw urine, kunt u gebruik maken van een glas, beker, jampot, etc. mits deze voor gebruik grondig gereinigd, uitgespoeld met water en droog zijn. U kunt uw glas/beker/pot direct in uw urinestraal houden en weghalen wanneer deze voldoende gevuld is.

Haal vervolgens het dopje van de spuit af.



Stap 2

Nadat u het dopje van de lege spuitaf heeft gehaald, pakt u het rietje (buisje).

U plaatst vervolgens de brede kant van het rietje op de voorkant van de spuit.



Stap 3

Hou het uiteinde van het rietje vervolgens in uw urine.

Trek vervolgens aan de steel aan de achterkant van de spuit, zodat de spuit zich automatisch vult met urine.



Stap 4

Nadat de spuit zich gevuld heeft met urine, houdt u het uiteinde van het rietje boven uw glas/beker/pot. Haal vervolgens het rietje weer van de spuit af.

Als u het rietje boven uw glas/beker/pot houdt, dan loopt het rietje vanzelf leeg. Zo voorkomt u geknoei met urine.



Stap 5

De spuit heeft zich nu gevuld met urine en het rietje is er vanaf.


Drukt u nu goed het dopje weer op de voorkant van de spuit.



Stap 6

U kunt nu de steel van de achterkant van de spuit afbreken.

Doe dit voorzichtig, u buigt de steel die vervolgens zal afbreken. De afgebroken steel kunt u bij het reguliere afval deponeren.

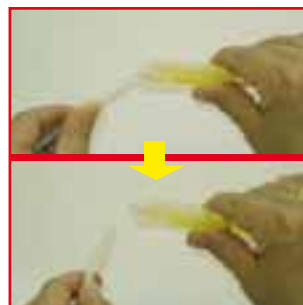

Stap 7

Nu kunt u het grotere zakje erbij pakken en de spuit met uw urine daarin stoppen. In het zakje bevindt zich reeds een absorptiemat. Dit is een matje die eventuele lekkage absorbeert.



Om het zakje luchtvrij en waterdicht te verpakken, dient u de zilverfolie strip dat zich in de opening van het zakje bevindt, los te trekken.

Nu kunt u de beide kanten van de opening van de zak tegen elkaar aan drukken.



Uw urine is nu klaar voor verzending.